


Весы Medisana BS 440 Connect

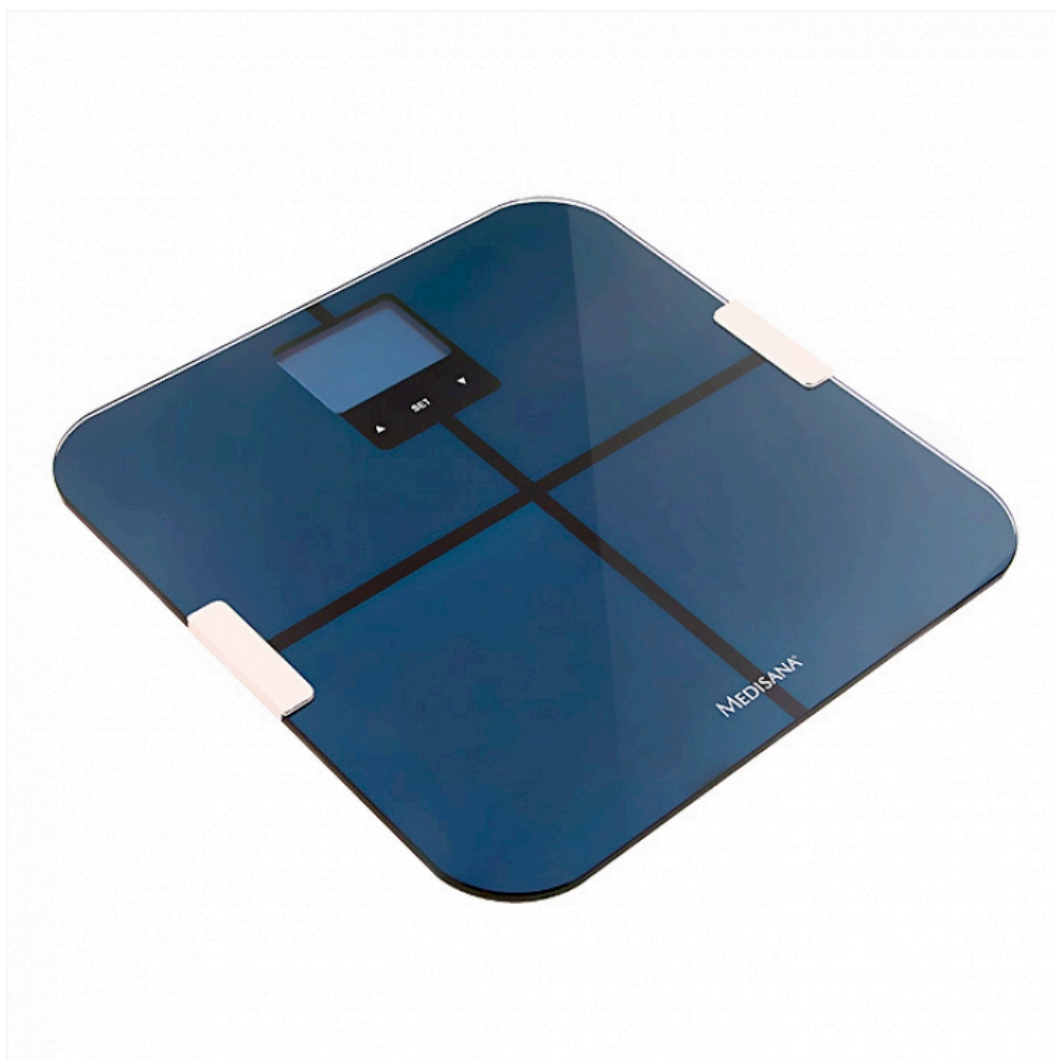

1. Категория: весы напольные электронные.

2. Технические характеристики

- Диапазон измерений: 4 – 180 кг.
- Точность измерения 100 г.
- Тип и количество датчиков массы: тензометрические (4 шт.).
- Тип дисплея: LCD (70 × 49 мм)
- Единицы измерения: килограммы, фунты, стоуны
- Измеряемые величины: масса тела, процентная доля костной ткани, мышечной ткани, жиров, жидкости в организме, индексы BMI (индекс массы тела), BMR (минимальное число калорий на жизнедеятельность в состоянии покоя).
- Автоматическое определение и сохранение в памяти до 8 профилей пользователей.
- Совместимые устройства: iPhone 4s и выше, iPad 3 и выше, Android 4.3 и выше.
- Передача данных: Bluetooth 4.0
- Автоматическое включение и выключение
- Питание: 4 батарейки типа AAA
- Материалы: стекло с электропроводящим покрытием (верх), белый пластик (основание), прорезиненные ножки.

3. Параметры устройства

Размеры: 320 × 320 × 24 мм

Вес: 2 кг

4. Работа с устройством

Первый запуск

Перед первым запуском необходимо извлечь тонкую пластиковую ленту из отсека для батареек, которая защищает элементы питания от преждевременной разрядки в промежуток времени между изготовлением весов и их покупкой. Для извлечения предохранительной ленты необходимо перевернуть весы и потянуть за выступающий из отсека конец ленты. После того, как защитная лента извлечена, весы готовы к работе.

Взвешивание

Для простого определения массы тела достаточно просто встать на весы. Весы включаются автоматически.



Создание профиля пользователя

В памяти весов могут храниться данные (пол, режим спортсмена, рост и возраст) до 8 человек. По умолчанию установлено значение «мужчина, рост 165 см, возраст 30 лет, масса в килограммах». Для изменения настроек необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку SET, расположенную под дисплеем весов;
- выбрать необходимую ячейку нажатием кнопок ▲ и ▼;
- данные сохраняются следующим нажатием кнопки SET; одновременно с этим переключается режим ввода на выбор пола и спортивной подготовки. Кнопками ▲ и ▼ можно выбрать между вариантами мужчина/женщина/мужчина–спортсмен/женщина–спортсмен; сохранение также производится кнопкой SET;
- далее аналогичным путем устанавливается рост и возраст;
- по завершении настройки персональных данных на дисплее появится индикация 0.0;
- для завершения настройки необходимо встать на весы босиком, при этом через несколько секунд на дисплее будут отражены вес, содержание жира в организме, содержание воды в организме, мышечная масса, масса костей, индекс BMR (потребность в калориях) и BMI (индекс массы тела).

Конфигурация весов со смартфоном

Конфигурация происходит посредством Bluetooth 4.0. Настройка производится единожды. Для соединения весов со смартфоном необходимо выполнить следующие действия:

- загрузить бесплатное приложение VitaDoc+ из AppStore или GooglePlay на смартфон;
- включить Bluetooth на смартфоне;
- запустить приложение;
- выбрать раздел «Настройки» → «Мои устройства» и после этого однократно нажать на кнопку SET на весах.
- при помощи кнопок ▲ и ▼ выбрать свой профиль;
- босиком встать на весы и дождаться звукового сигнала;
- оставаясь на весах, в приложении на смартфоне выбрать свои весы для их соединения по Bluetooth;
- при желании можно изменить персональные настройки в приложении;



- данные всех последующих измерений при запущенной программе и включенном Bluetooth автоматически передаются и сохраняются в смартфоне, при наличии интернета копируются также на облачный сервер.

Замена батареек

- Перевернуть весы;
- сдвинуть крышку, закрывающую батарейный отсек по горизонтали;
- извлечь старые батарейки;
- соблюдая полярность установить 4 одинаковые новые батарейки AAA;
- уложить крышку батарейного отсека в пазы горизонтально и задвинуть до упора.

5. Меры предосторожности

- использовать весы только по назначению;
- не использовать весы беременными женщинами и людьми с медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами);
- не использовать для определения содержания жира и других показателей у детей, за исключением массы тела;
- не использовать после попадания в воду или повреждения;
- следить за тем, чтобы поверхность была сухой;
- не вставать на весы мокрыми ногами или в носках (есть опасность поскользнуться);
- не устанавливать весы на неровной поверхности во избежание опрокидывания.

6. Комплектация:

- весы напольные
- 4 батарейки AAA
- инструкция по эксплуатации

7. Производитель: MEDISANA AG (Германия).

