



# Заживляющий спрей Prontosan®



Руководство пользователя

**1. Классификация:**

Антисептики и дезинфицирующие средства

**2. Описание:**

Стерильный раствор для наружного применения. Имеет широкий антимикробный спектр действия. Активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, *St. aureus*, *St. epidermidis*, MRSA, грибов. Используется для очищения, увлажнения и деконтаминации ран различного происхождения. Эффективно разрушает и удаляет бактериальные пленки, препятствующие заживлению. Поверхностно-активное вещество не повреждает тканей, способствует эффективному очищению раны; полигексанид эффективен в отношении бактерий и грибов, не повреждает грануляции и эпителий, не разрушает окружающие ткани, и не всасывается в кровь.

**3. Форма выпуска:**

флакон-спрей 75 мл

**4. Состав:**

Очищенная вода, сурфактант бетаин, 0,1% полиаминопропил бигуанид (полигексанид)

**5. Показания к применению**

Первичная обработка ран, ожогов, натертостей, раздражений и высыпаний, в том числе на губах. Способствует заживлению при диабетических поражениях кожи, экземе, нейродермите, трофических язвах и т.д.

**6. Способ применения и дозировка:**

Распылить спрей на поврежденную поверхность с захватом здоровой кожи вокруг. Количество распыляемого спрея зависит от размера поврежденного участка. При наличии в ране посторонних частиц постараться смыть их спреем.

**7. Противопоказания:**

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

**8. Условия хранения:**

Хранить при комнатной температуре, вдали от прямого солнечного света в местах недоступных для детей. Не использовать по истечении срока годности.

**9. Производитель:**

B. Braun Melsungen AG

**10. Страна производства:**

Швейцария