



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Кардиограф KardiaMobile





1. Тип товара: портативный кардиограф

2. Характеристики

- Тип кардиограммы: одноканальная
- Длительность записи: от 30 секунд до 5 минут
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Kardia
- Совместимость: iOS 10 и последующие версии, Android 5.0 и последующие версии
- Тип беспроводного подключения: Bluetooth
- Материалы: пластик, нержавеющая сталь
- Размеры: 82 x 32 x 3,5 мм
- Вес: 18 г
- Размеры упаковки: 130 x 130 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~120 г



### 3. Установка приложения

Приложение Kardia не представлено в российских магазинах App Store и Google Play.

Для установки приложения на iPhone и iPad необходимо изменить страну привязки App Store. После установки приложения вы сможете вернуться к стандартным настройкам.

Важно: для смены магазина необходимо отключить подписку на Apple Music и другие сервисы Apple. В противном случае вам не удастся этого сделать.

#### Порядок действий

- Зайти в настройки → iTunes Store и App Store.
- Нажать на ваш Apple ID. Нажать «Просмотреть Apple ID».
- Ввести пароль или авторизоваться через Touch ID.
- Нажать кнопку «Страна/регион». Указать интересующую вас страну (в данном случае – США). Подтвердить выбор и перезапустить App Store.

*Кроме того, иногда бывает необходимо изменить платежные реквизиты.*

- Выбрать способ оплаты и ввести платежную информацию.
- Ввести адрес выставления счетов и нажать «Далее».

После изменения настроек вы можете найти и скачать приложение Kardia в App Store. После этого рекомендуется вернуться к стандартным настройкам.

Для установки приложения для операционной системы **Android** воспользуйтесь следующей ссылкой.


<https://apkpure.com/kardia/com.alivecor.aliveecg>

Либо самостоятельно найдите установочный файл приложения по запросу Kardia apk.

Скачайте файл, запустите его и дайте разрешение на установку приложения из внешнего источника.

Внимание! Установка приложения из непроверенного источника может привести к установке вредоносных программ и заражению вашего мобильного устройства вирусами.

#### 4. Использование кардиографа

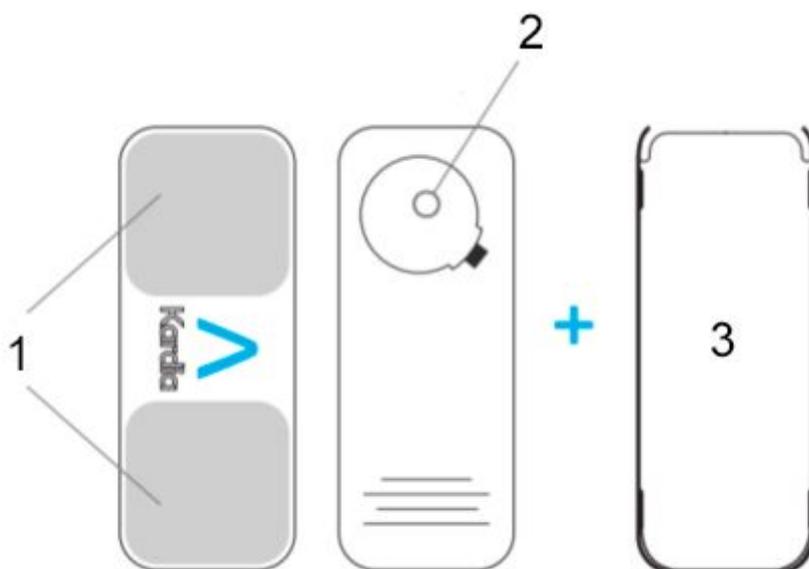

- 1 – контактные пластины (вид спереди)
- 2 – крышка батарейного отсека (вид сзади)
- 3 – крепление на смартфон

Для установки крепления очистите заднюю поверхность корпуса смартфона/планшета от загрязнений и обезжирьте ее. После этого приклейте крепление с помощью нанесенного на него скотча.

Для питания кардиографа используется батарейка формата CR2016, которой хватает примерно на год работы устройства. Для замены батарейки откройте крышку отсека (2), повернув ее, извлеките старый и установите новый элемент питания, соблюдая полярность.

После установки приложения (см. раздел 3) откройте его и следуйте подсказкам, чтобы создать аккаунт. Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включен Bluetooth.


**Внимание!** Для получения верных результатов необходимо сохранять



неподвижность при измерении. Перед каждым использованием устройства рекомендуется очищать контактные пластины, протирая их мягкой тканью.

**Внимание!** Не используйте кардиограф, когда ваше мобильное устройство заряжается.

Для снятия кардиограммы расположите пальцы на электродах устройства. Кардиограф можно использовать как установив в крепление, так и отдельно — расположив на любой ровной поверхности.

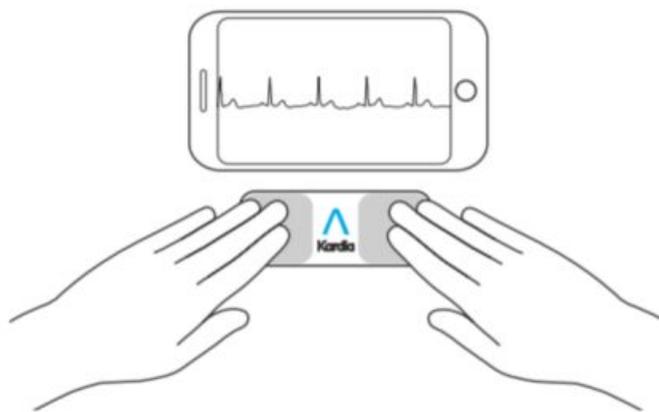

Расстояние между KardiaMobile и смартфоном/планшетом не должно превышать 30 см.



После первого снятия кардиограммы она будет автоматически отправлена на анализ (обратите внимание, что по умолчанию этот сервис доступен только в США). Ответ должен прийти в течение 24 часов. В дальнейшем вы можете снимать и сохранять кардиограммы в любое удобное для вас время, запуская приложение и выбирая пункт Record Now.

Для получения более подробной информации вы можете обратиться в службу поддержки компании-производителя.



## **ВНИМАНИЕ!**

Несмотря на высокую точность измерений, гаджет не является прибором для проведения холтер-тестирования или других медицинских исследований. Вся информация, предоставляемая KardiaMobile, может использоваться только в ознакомительных целях!

Кардиограмма, снятая прибором, не может быть использована для диагностирования заболеваний.

Перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с кардиологом.

### **5. Комплектация**

- Кардиограф KardiaMobile
- Крепление на мобильный телефон
- Документация

### **6. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР**