

Санитарные респираторы KN95

Инструкция по применению





Характеристики

Фильтрует частицы до: PM2,5

Соответствует стандартам: FFP2, N95

Габариты упаковки: ~100 x 100 x 30 мм

Вес: ~ 100 г

Страна-производитель: КНР



Использование

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить санитарные маски всем сотрудникам, находящимся в непосредственной близости от зараженных людей, во избежание попадания частиц слюны и мокроты на слизистую. Также маска обязательна для людей, больных заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, находящихся в непосредственном контакте со здоровыми людьми. Для здоровых людей ношение маски не обязательно, но ряд исследований показывает, что ношение маски существенно снижает возможность заражения. Маски не способны полностью защитить от заражения, но снижают его вероятность, останавливая некоторые частицы и не давая пользователю трогать рот и нос.

Эффективное время ношения маски составляет три часа, по истечении которых средство защиты необходимо заменить.



1. Перед использованием маски вымойте руки. Расправьте маску.
2. Зафиксируйте носовое крепление так, чтобы оно прилегало как можно плотнее.



3. Надевайте и снимайте защитную маску только за ушные петли.
4. Маска обязательно должна закрывать нос и подбородок.

- Старайтесь не касаться маски-респиратора во время ношения.
- Меняйте, как только ткань станет влажной.
- Не используйте маску повторно.
- После замены маски рекомендуется вымыть руки с мылом.



Комплектация

- Маски санитарные KN95 — 5 шт.