

Маска против храпа Snore Circle

руководство пользователя





Тип товара: маска против храпа с электронным модулем

Характеристики

- Размер: универсальный, регулируемый
- Материалы: гипоаллергенная синтетическая ткань, АВС-пластик
- Вес: 38 г
- Размеры электронного блока: 42 x 20 мм
- Приложение для мобильных устройств: Sleepplus
- Совместимость: iOS 8 и последующие версии, Android 6 и последующие версии
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
- Размеры упаковки: ~200 x 120 x 45 мм
- Вес в упаковке: ~200 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР


Комплектация

- Маска Snore Circle
- Кабель для подзарядки аккумулятора
- Документация

1. Описание устройства

Маска от храпа SNORE CIRCLE предназначена для обнаружения и устранения храпа во время сна. При постоянном использовании улучшает качество сна и благоприятно влияет на самочувствие.

Характеристики устройства

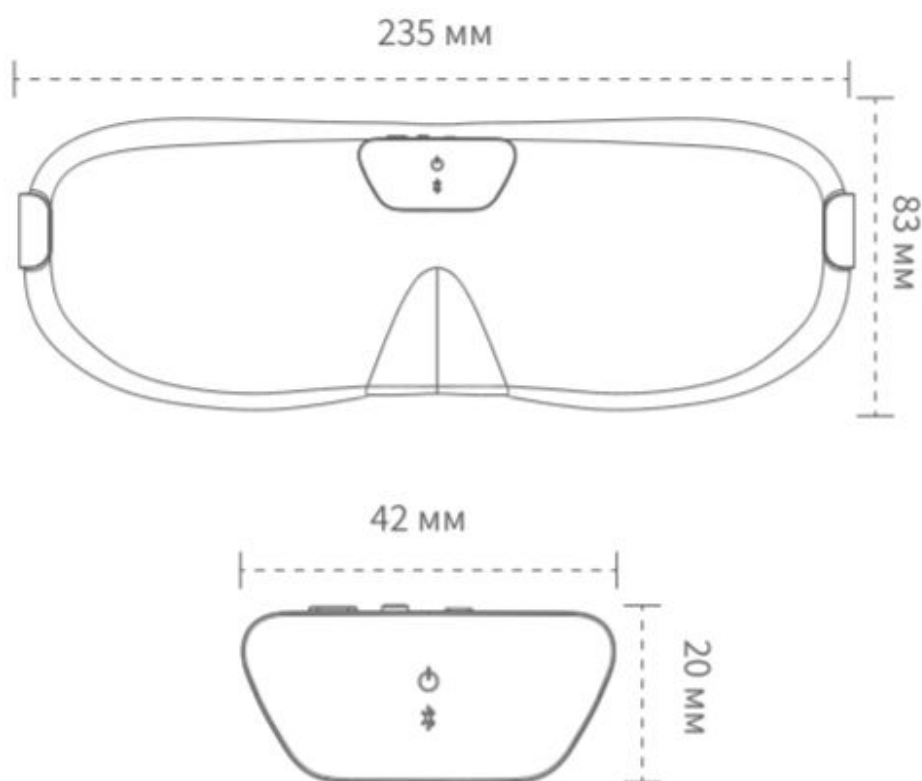

Вес: примерно 38 г

Функциональные кнопки



Комплектация

Маска от храпа - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.
Зарядный кабель - 1 шт.

2. Включение и выключение устройства

Включение

Чтобы включить устройство, просто переведите переключатель питания в положение ON. После включения индикатор питания загорится на 15 секунд, а индикатор Bluetooth будет мигать в течение 15 секунд, затем оба индикатора погаснут.



Выключение

Чтобы выключить устройство, переведите переключатель питания в положение OFF. Индикаторы питания и Bluetooth погаснут после успешного выключения устройства.



3. Зарядка и индикация состояния батареи

Проверка уровня заряда батареи

Определить уровень заряда батареи можно при включении устройства.

Красный индикатор питания указывает на то, что устройство разряжено и требует зарядки.



Зеленый индикатор питания указывает на то, что в устройстве достаточный заряд батареи и зарядка не требуется.



Чтобы посмотреть точный уровень заряда батареи, подключите устройство к приложению Sleepus.

2020-04-21 08:22  75%

(1) В этом устройстве используется аккумуляторная литий-полимерная батарея.

(2) Для полной зарядки батареи требуется примерно два часа, после чего устройство сможет проработать примерно две ночи.

3) Подключите устройство к источнику питания. Используйте комплектный кабель microUSB. Индикатор питания начнет мигать.

(4) Красный мигающий индикатор указывает на низкий уровень заряда батареи, а зеленый мигающий индикатор указывает на то, что устройство почти полностью заряжено. После полной зарядки устройства зеленый индикатор питания будет гореть постоянно. Устройство автоматически выключится после отключения зарядного устройства.

4. Bluetooth соединение и синхронизация данных

(1) Для того, чтобы подключить устройство к мобильному приложению индикатор Bluetooth должен мигать. Для этого переведите переключатель питания в положение ON и нажмите кнопку FUNC. Индикатор Bluetooth будет мигать в течение 15 секунд. Индикатор выключится, если не удалось подключиться к телефону.

(2) Убедитесь, что Bluetooth вашего телефона включен.

(3) Откройте мобильное приложение Sleepus и убедитесь, что ваш телефон находится рядом с устройством. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы привязать и подключить устройство. При успешном подключении индикатор Bluetooth перестанет мигать и будет гореть постоянно.


(4) Поддерживаются только iPhone с iOS 7.0 и выше или телефоны Android с 4.3 и выше, Bluetooth 4.0 LE. Если ваш телефон Android 7.0 или выше, включите функцию «Местоположение» для подключения к устройству и синхронизации данных.



5. Ношение и очистка устройства

(1) После включения устройства, наденьте маску, как показано на рисунке.

Пожалуйста, убедитесь, что основной электронный компонент располагается у вас на лбу.

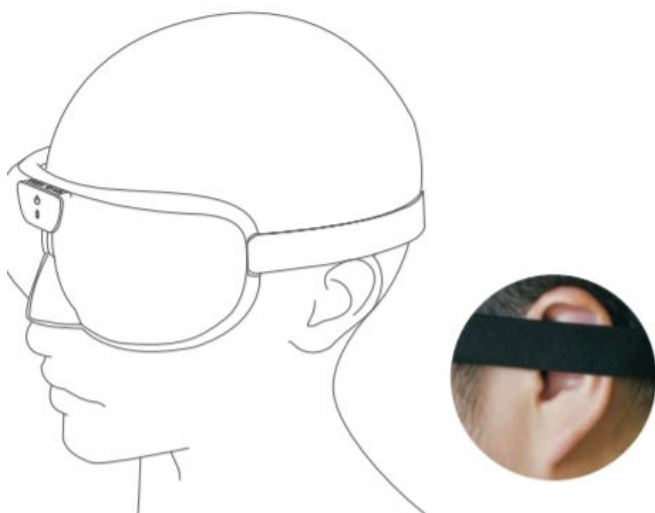


(2) Основная электронная часть этого устройства не является водонепроницаемой.

Пожалуйста, не забудьте снять ее, прежде чем мыть или стирать маску. При выборе машинной стирки, пожалуйста, положите маску в сетчатый мешок для белья, чтобы предотвратить её повреждение.


Для очистки устройства рекомендуется использовать влажную ткань.

(3) Как снять электронный компонент маски от храпа: Крепко удерживайте маску одной рукой, поместив большой палец ниже электронного компонента (А). Крепко удерживайте пальцами основание компонента на тыльной стороне маски, как показано ниже (В), другой рукой отделите электронный компонент (1) и аккуратно снимите его с маски (2).

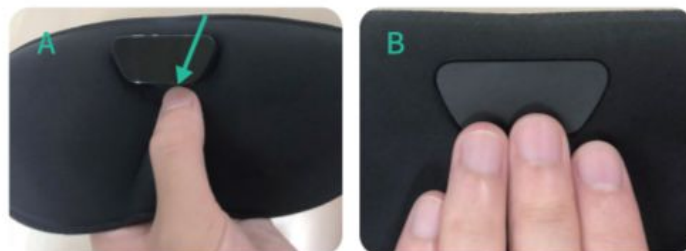

(4) Как установить электронный компонент маски от храпа.

Расположите электронный компонент напротив гнезда крепления (2) и нажмите, чтобы защелкнуть и установить его на место.

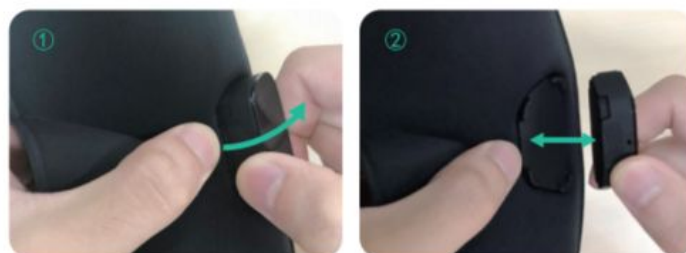



6. Приложение

Как скачать приложение:

- (1) iPhone: Введите в поиске Sleepus в App Store, чтобы загрузить и установить приложение.
- (2) Android: найдите Sleepus в Google Play, чтобы загрузить и установить приложение.
- (3) Отсканируйте QR код ниже



7. Гарантийное обслуживание

- (1) На данный продукт распространяется годовая гарантия с даты покупки.
- (2) На повреждения по вине пользователя гарантия не распространяется.
- (3) Рекомендуется использовать не менее двух недель для подстройки устройства под вас и неделю для привыкания к маске.

8. Меры предосторожности

- (1) Используйте и храните устройство при температуре от -10 °C до +50 °C.
- (2) Держите устройство вдали от источников возгорания или высоких температур (электрические нагреватели, микроволновые печи, духовки и т. д.).
- (3) Во избежание повреждений не подвергайте устройство воздействию сильных ударов или сильных вибраций.
- (4) Не используйте химические вещества, моющие средства или другие продукты для очистки устройства. Держите устройство сухим и не мойте электронный компонент.
- (5) Во избежание повреждения не пытайтесь самостоятельно удалить или заменить встроенную литиевую батарею.
- (6) Во избежание взрыва, не бросайте устройство в огонь.
- (7) Это устройство не является игрушкой. Во избежание проглатывания или удушья, пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте.



9. Вещества и составляющие элементы

Название компонента	Токсичные вещества и их концентрации					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr6 +)	Полибромированные дифенилы (PBB)	Полиброминированные дифениловые эфиры (PBDE)
Корпус	○	○	○	○	○	○
Кнопки	○	○	○	○	○	○
Инструкция	○	○	○	○	○	○
Комплектная батарея	○	○	○	○	○	○
Мягкая маска для глаз	○	○	○	○	○	○

1. «О» означает, что концентрация опасного вещества во всех гомогенных материалах в компоненте ниже предельного значения стандарта SJ/T11363-2006.
2. «х» означает, что содержание токсичного и опасного вещества по крайней мере в одном гомогенном материале компонента превышает предельное требование стандарта SJ/T11363-2006.

Экологический период использования

Компонент	Environmental Friendly Use Period
Маска от храпа SNORE CIRCLE	10

*Вышеуказанный период использования основан на нормальных условиях эксплуатации (температура / влажность)

Стандарт продукта: Q/YZFD 002-2017

Предостережение FCC

§ 15.19 Требования к этикетированию. Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям:

- (1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и
- (2) данное устройство должно принимать любые внешние воздействия, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

§ 15.21 Информация для пользователя.

Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. § 15.105 Информация для пользователя. Примечание. Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует использование и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентировать или переместить прием. антенна.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Советуйтесь с дилером или опытным радио / телевизионным техником.

* РЧ предупреждение для портативного устройства: устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство может использоваться в условиях портативного воздействия без ограничений.