

# Гидропомпа Bathmate Hydro7

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** гидropомпа для увеличения полового члена

2. **Характеристики**

- Материалы: гипоаллергенный силикон, поликарбонат
- Максимальный размер члена (перед использованием): 17,5 x 4,5 см
- Размеры помпы: 300 x 53 x 53 мм
- Вес: 390 г
- Размеры упаковки: ~325 x 70 x 70 мм
- Вес в упаковке: ~430 г
- Страна-разработчик: Великобритания

3. **Меры предосторожности**

**Внимание!** Перед использованием гидropомпы **необходимо** проконсультироваться с врачом. iG-store не несет ответственности за возможные травмы, полученные в результате неправильного, слишком длительного или слишком частого использования устройства.

**Противопоказания**

- Склонность к тромбозам и болезням сосудов
- Уретрит
- Заболевания печени и почек
- Заболевания крайней плоти
- Нарушение кровообращения, склонность к кровотечениям
- Лечение с обезболивающими медикаментами

**Кратковременные побочные эффекты**

После использования помпы член может изменить цвет: на нем могут появиться кровоподтеки, красные или фиолетовые пятна, кожа может стать сухой. Это происходит из-за разрыва капилляров и возникновения подкожных микротравм.



Из-за слишком длительного воздействия отрицательного давления может возникнуть чувство онемения. Твердость члена может быть ослаблена у основания.

Побочные эффекты имеют кратковременный характер и проходят естественным путем. Тем не менее при использовании помпы необходимо соблюдать разумную осторожность.

#### **4. Использование помпы**

Налейте в помпу теплую воду, затем введите в нее пенис.

Основание помпы следует плотно прижать к лобковой кости. Для создания необходимого давления внутри помпы на нее следует нажать: при сжатии гофры через верхний клапан вытесняется лишняя вода.

После этого отпустите помпу – при распрямлении гофры в колбе автоматически создается разряжение.

Используйте помпу в течение 5-15 минут, затем ослабьте давление с помощью клапана, снимите помпу и промассируйте пенис для ускорения кровотока.

Устройство можно применять ежедневно. Максимальный результат достигается при регулярном использовании.

#### **5. Комплектация**

- Гидропомпа Bathmate Hydro7
- Документация