



# Жидкий пластырь New-Skin Botanicals

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: жидкий пластырь

## 2. Характеристики

- Состав: вода, поливинилацетат, сополимер АМП-акрилатов/аллилметакрилата, ксантановая камедь, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, сок листьев алоэ барбаденсис, цветок ромашки обыкновенной (*matricaria*), глицерин, цветочное масло лаванды узколистной
- Объем: 30 мл
- Габариты упаковки: 90 x 105 x 25 мм
- Вес упаковки: 68 г
- Условия хранения: при температуре от +10 до +25 °С
- Страна-производитель: Канада

## 3. Использование

Продезинфицируйте пораженный участок кожи. Нанесите на него один слой средства. Для того чтобы создать более плотный слой, можно, подождав пару секунд, нанести второй слой жидкого пластыря. В течение дня можно повторить нанесение средства. Для того чтобы удалить пластырь, нужно нанести сверху свежий слой, а затем аккуратно оторвать всю конструкцию от кожи.

**Внимание!** Жидкий пластырь не подходит для использования на глубоких, мокрых, кровоточащих ранах, повреждениях очень большого размера, следах от укусов животных. Пластырь необходимо беречь от детей, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, держать в прохладном месте, использовать только для наружного применения. В случае индивидуальной непереносимости компонентов нужно прекратить использование и обратиться к врачу.

## 4. Комплектация

- Флакон жидкого пластыря New-Skin Botanicals
- Аппликатор для нанесения средства