



магазин
ИННОВАЦИЙ

Пояс с подогревом и вибромассажем

SmartHeat Belt

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** пояс для облегчения менструальной боли и спазмов

2. **Характеристики**

Тип товара: пояс массажный с подогревом

Размер (обхват талии): ~50-90 см

Количество уровней нагрева: 4

Количество режимов массажа: 5

Тип управления: цифровой

Источник питания: встроенный литий-ионный аккумулятор

Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C

Размеры устройства: 210 x 90 x 55 мм

Вес: ~220 г

Размеры упаковки: ~240 x 110 x 75 мм

Вес в упаковке: ~420 г

Страна-производитель: КНР

3. **Зарядка аккумулятора**

Все клавиши, дисплей, а также разъем для подзарядки аккумулятора расположены на круглой выступающей части корпуса.



Разъем USB Type-C находится снизу. Подключите к нему кабель, входящий в комплект. Разъем на конце шнура подключите к любому зарядному устройству USB или пауэрбанку, которые обеспечивают силу тока не менее 1 А.

Уровень заряда аккумулятора отображается на дисплее устройства.

4. Использование пояса

Наденьте пояс, как показано на иллюстрации. Отрегулируйте длину ремешка так, чтобы устройство плотно прилегало к телу, но не оказывало избыточного давления. Центральный блок пояса рекомендуется размещать над очагом боли и спазмов.



Кнопки для управления работой пояса находятся на круглом выступающем сегменте корпуса – по бокам.

Для включения подогрева нажмите и удерживайте кнопку, расположенную справа (если смотреть на пояс спереди). На экране появится цифра 1 – это первый уровень нагрева. Нажимая кнопку последовательно, вы можете переключаться между 4 уровнями нагрева – при этом цифра на экране будет меняться. Через 5 секунд после выбора режима на экране появится уровень заряда аккумулятора. Чтобы снова увидеть, какой режим выбран, нажмите правую кнопку повторно. Для того чтобы отключить подогрев, нажмите и удерживайте правую кнопку.



Для включения вибромассажа нажмите и удерживайте правую клавишу. Нажимая кнопку последовательно, вы можете переключаться между 5 режимами массажа. Обратите внимание: эти режимы не отображаются на дисплее, их можно различать по характеру вибрации.

Вы можете использовать функции нагрева и массажа как по отдельности, так и совместно.

Если боль отдает в поясницу, массажный блок пояса можно переместить на спину.

Время использования SmartHeat Belt не ограничено. Однако производитель не рекомендует использовать его во время сна. Соблюдайте разумную осторожность. Вибромассаж и прогревание можно сочетать с приемом обезболивающих препаратов.

5. Меры предосторожности

Имеются противопоказания! Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом!

Если вы ощущаете дискомфорт или болевые ощущения и спазмы усиливаются, немедленно прекратите использование пояса. Когда неприятные ощущения исчезнут, вы можете опробовать другой режим или изменить положение устройства.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте ударов и других механических нагрузок, способных повредить устройство.

Не допускайте попадания влаги на корпус устройства.

Не используйте поврежденные кабели или сетевые адаптеры совместно с устройством.

Храните пояс в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и источников огня.